




1 불러올 라이브러리 다운받은 후 압축 해제

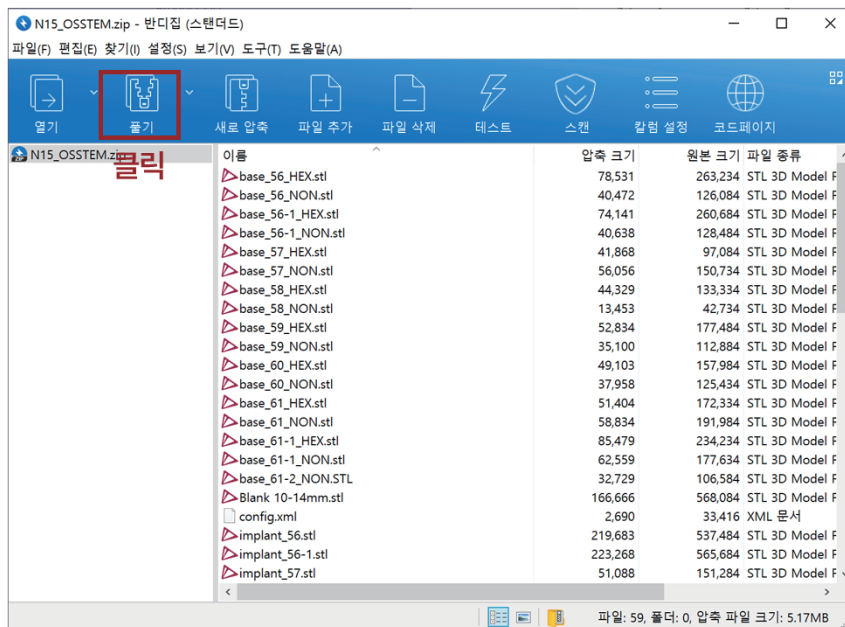


2 EXO 프로그램 오른쪽마우스 클릭 후 파일 위치열기 클릭[프로그램 상관없음]

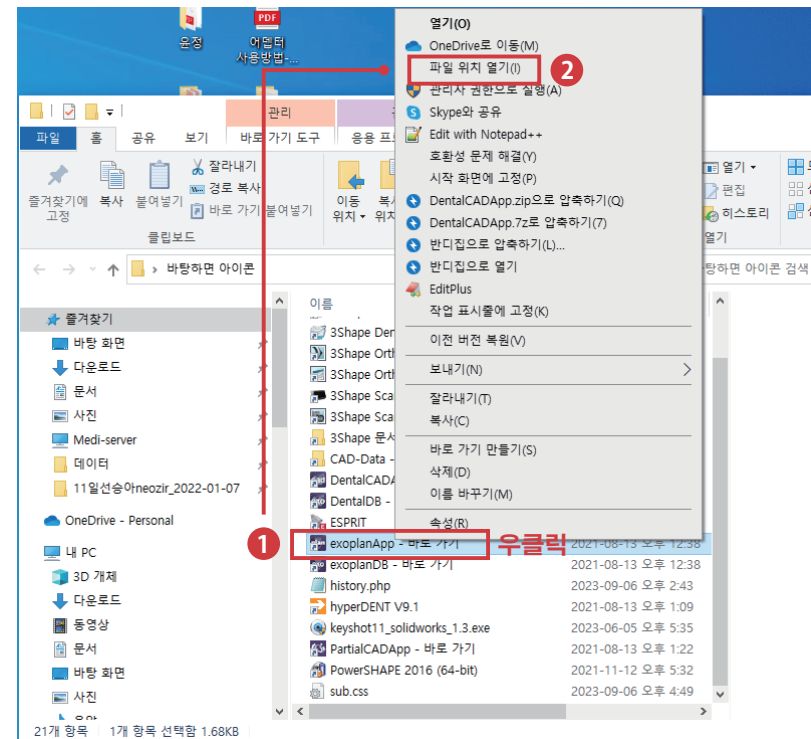

3 열린 창에서 상위 폴더로 돌아가기

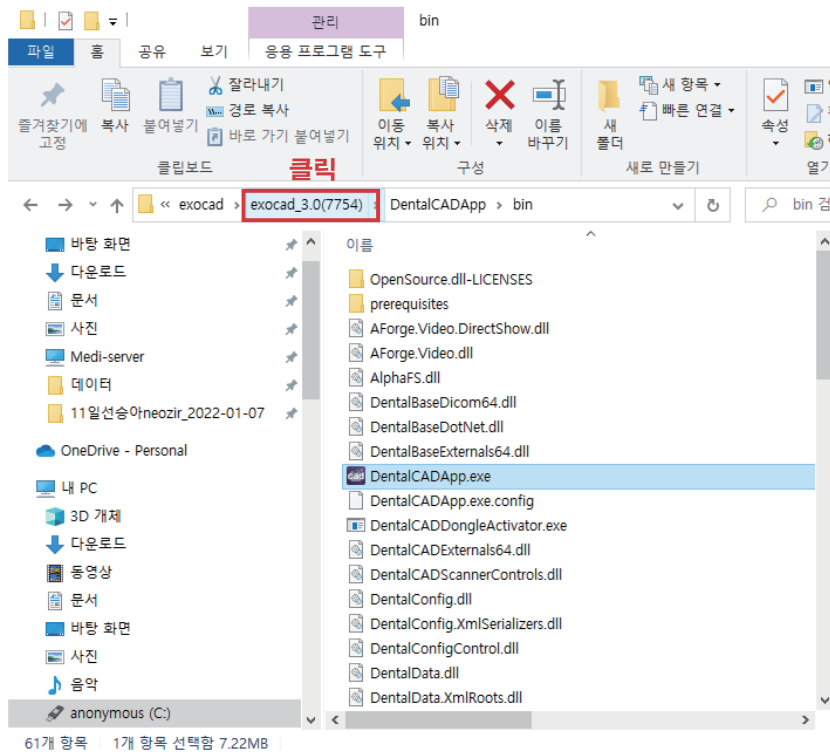


4 'Dental CADApp' 폴더 클릭

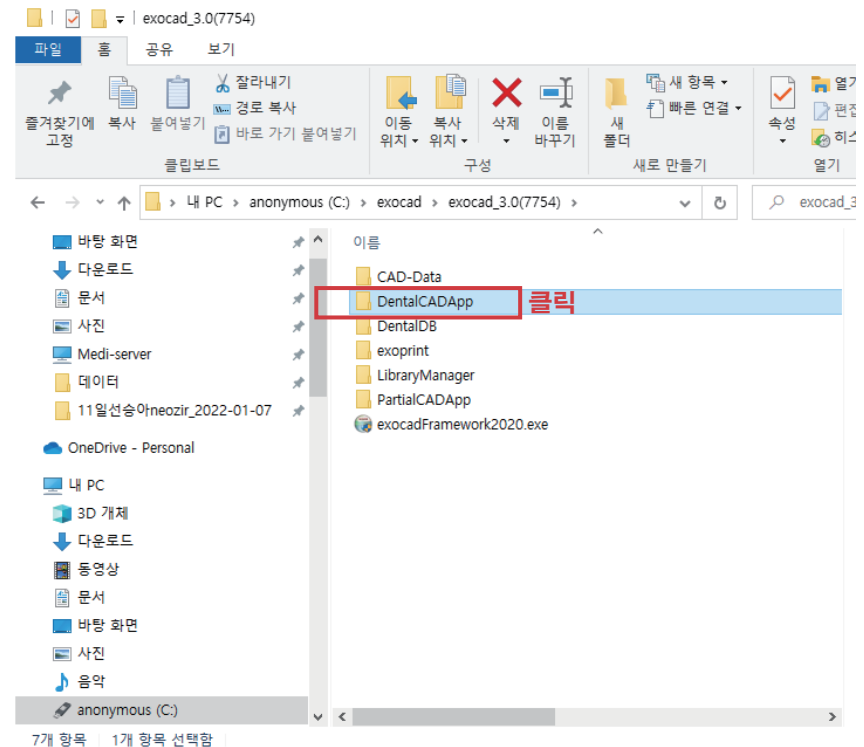


exocad

5 'Libray' 폴더 클릭

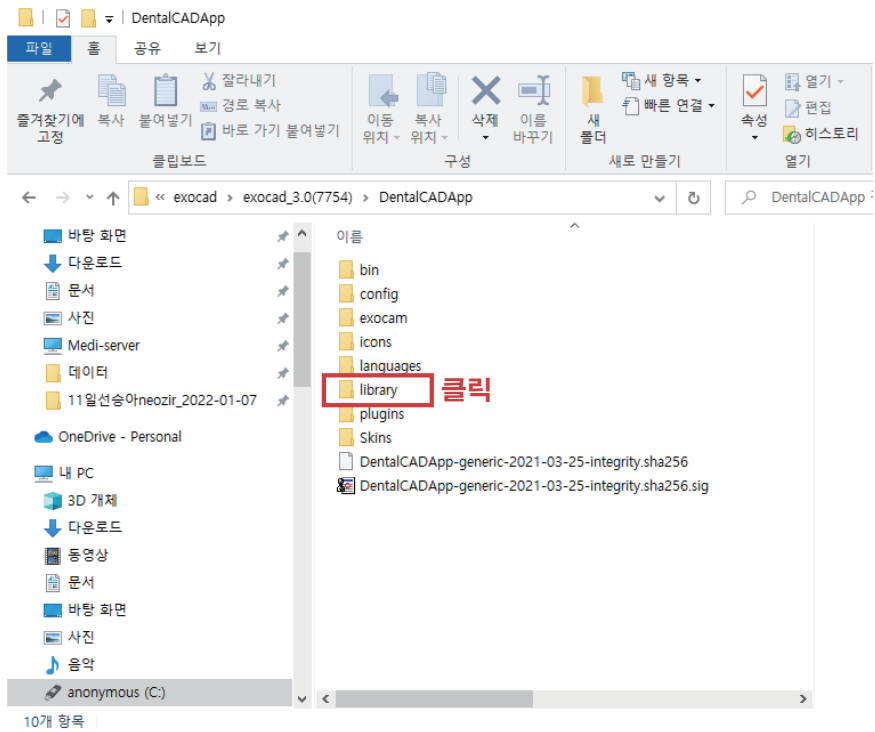

6 'implant' 폴더 or 'modelcreator' 폴더 클릭 [원하는 작업폴더 선택]

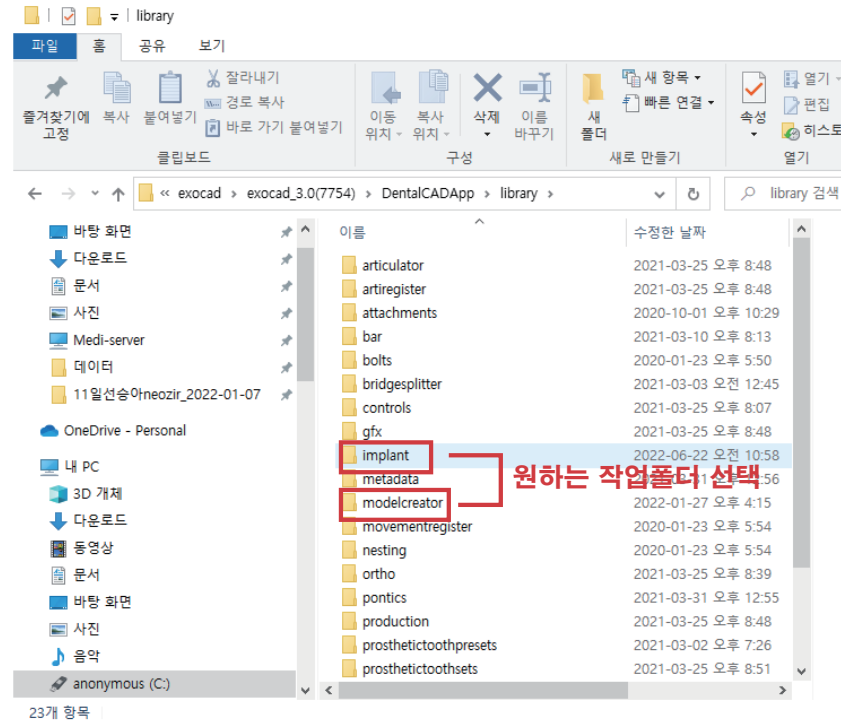

7 다운받았던 라이브러리 파일복사(Ctrl+C) 후 'implant' 폴더에 붙여넣기(Ctrl+V)

